

NEDERLANDS

Samenstelling Materiaal

BINAMED® KRABPAKKEN:
rompertje, overall, shirt
en broek

88% modal, 11 % polyamide, 1 % lycra.

BINAMED® KRABPAKKEN:
handschoenen, sokken
en armbandjes

91% modal, 7 % polyamide, 2 % lycra.

Wasvoorschrift bij de speciale BINAMED®-KRABPAKKEN



Gebruik bij het wassen van de speciale BINAMED® KRABPAKKEN altijd een fijn wasmiddel, indien mogelijk zonder parfum en geurstoffen, en houd een maximumtemperatuur van 60°C aan. *Gebruik in geen geval desinfectiemiddelen, chloorbevattende reinigingsmiddelen of wasverzachter.*

De fabrikant en leverancier zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel wegens onjuist gebruik.



De BINAMED® KRABPAKKEN mogen niet gebleekt worden en niet met chloor in contact komen.



Het is mogelijk de BINAMED® KRABPAKKEN te drogen in de droogtrommel op lage temperatuur met een korte droogcyclus.



Strijk de BINAMED® KRABPAKKEN steeds op matige temperatuur en zonder stoom.



BINAMED® KRABPAKKEN niet chemisch laten reinigen.

WWW.BINAMED.NL

Belangrijke aanwijzingen bij dit product

- Was de BINAMED® KRABPAKKEN voordat ze voor het eerst gedragen worden.
- **Let op:** kleurschakeringen, kleurverschillen en verkleuringen zijn geen fabricagefouten en geen kwaliteitsgebrek.

Exclusieve distributie in Nederland:



BAP Medical BV, a.s. BT,
Jan van der Marcp 116, Apeldoorn,
Produced exclusively for BAP Medical
by Binamed Moll GmbH, Germany
info@bap-medical.com



D/NL	E	GB
62/68	3-6 MESES	6 MONTHS
74/80	6-12 MESES	12 MONTHS
86/92	86	2
98/104	102	4
110/116	114	6
122/128	126	8
134/140	138	10
146/152	150	12
158/164	162	14



D/NL	E	GB
S	36/38	38/40
M	40/42	42/44
L	44/46	46/48
XL	48/50	50/52
XXL	50/52	54/56



D/NL	E	GB
S	44/46	38/40
M	48/50	42/44
L	52/54	46/48
XL	56/58	50/52
XXL	60/62	66/68



BINAMED®

Medizinischer Kratzschutz
Scratch-Protection
Protección contra rasguños
Medische Krabpakken

Made in Germany



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
140.3820 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



BINAMED®



Binamed Moll GmbH

Kulmbacher Straße 115 • D - 95445 Bayreuth

Tel. +49 (0) 9 21 - 7 45 90 • Fax +49 (0) 9 21 - 4 39 40

info@binamed.de • www.binamed.de